

# OGI PASEO

Andador transformable en silla



ogi.

*Marcamos la diferencia*



Manual de instrucciones  
Válido a partir de febrero 2025



## INFORMACIÓN IMPORTANTE

En este manual de instrucciones, encontrará la información necesaria sobre el producto que ha adquirido. Antes de proceder al montaje y uso del andador, lea detenidamente las indicaciones de este manual.

Tenga en cuenta las advertencias de seguridad proporcionadas y asegúrese de que solo personas familiarizadas con estas utilizan el producto. Es recomendable guardar el manual de instrucciones para futuras consultas e incluirlo en caso de transferir el producto a otra persona.



Pueden existir pequeñas variaciones estéticas debido a actualizaciones de modelo que no afectarán ni a la utilidad ni al funcionamiento del producto.

## ÍNDICE DE CONTENIDOS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	3
ENUMERACIÓN DE PARTES	3
INDICACIONES DE USO	3
DATOS TÉCNICOS	4
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	5
TRANSFORMAR EL ANDADOR EN SILLA	6
PLEGADO DEL ANDADOR	6
AJUSTE DE ALTURA DE LAS MANETAS	7
FRENADO	7
PORTABASTONES	8
ASIENTO	8
INDICACIONES DE SEGURIDAD	9
LIMPIEZA Y CUIDADOS	10
ALMACENAJE	10
REPARACIÓN	10
TRATAMIENTO DE RESIDUOS	10
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD	10
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	10
GARANTÍA	11

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Andador de aluminio ligero transformable en silla para poder tomar descansos sobre la marcha. Apto para usuarios de hasta 136 kg. Equipado con neumáticos macizos a prueba de pinchazos y frenos en maneta con autobloqueo. Permite ajustar las manetas en altura para adaptarse a cada usuario. Plegable para fácil almacenamiento.


## ENUMERACIÓN DE PARTES



## INDICACIONES DE USO

- **Uso en interiores:** Diseñado para proporcionar estabilidad y movilidad en hogares, residencias, hospitales, etc.
- **Uso en exteriores:** Permite actividades como hacer la compra, pasear y llevar a cabo tareas cotidianas cerca de casa de forma cómoda y segura.
- El asiento proporciona la comodidad y conveniencia de hacer descansos cortos cuando sea necesario.
- El andador está destinado exclusivamente a uso privado. No se ha desarrollado para uso comercial.

## DATOS TÉCNICOS

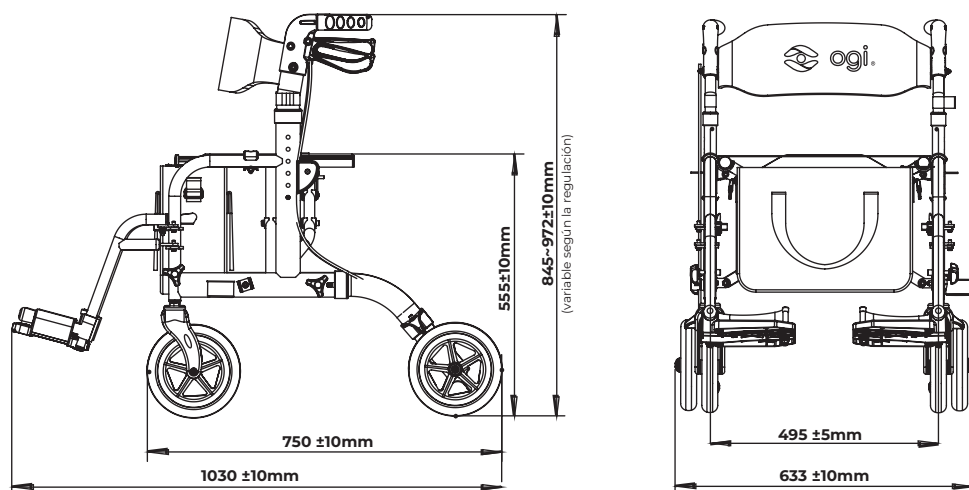


### OGI PASEO

Chasis	Aluminio
Color	Azul
Ruedas delanteras	Giratorias 8 pulgadas PU macizo
Ruedas traseras	8 pulgadas PU macizo
Ancho	63 cm
Longitud	103 cm
Altura	84-97 cm
Ancho de asiento	49 cm
Altura de asiento	55 cm
Peso máx usuario	136 kg
Peso neto	8,5 kg
Peso bruto	9,5 kg

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE

- Coloque el chasis sobre una superficie nivelada.
- Abra el chasis y asegúrese de que el asiento quede bloqueado correctamente en su posición, tal como se muestra en la imagen.

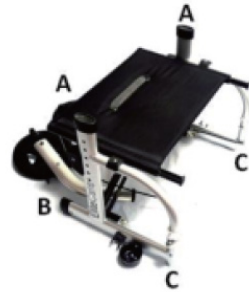

- Inserte las dos manetas en sus orificios designados en los puntos marcados como "A", haciendo coincidir el agujero del tubo de las manetas con el agujero deseado del chasis y atraviéselos con el tornillo de sujeción.
- Fije la posición enroscando la estrella.
- Puede escoger entre 6 niveles de altura (vea pág. 7, Ajuste de altura de las manetas).
- Inserte las dos patas traseras en los puntos marcados como "B". Las patas disponen de un clip en su extremo, el cual debe hacer coincidir y atravesar el agujero lateral de los tubos.



- Confirme que el ajuste ha sido correcto al escuchar el click. Verifique que las patas queden correctamente bloqueadas en su posición.

- Inserte las dos ruedas delanteras en los puntos marcados como "C".
- Haga coincidir el agujero del tubo de las patas con el agujero del chasis y atraviéselos con el tornillo de sujeción. Fije la posición enroscando la estrella.



## TRANSFORMAR EL ANDADOR EN SILLA



- Frene el caminador utilizando las manetas de freno
- Invierta la posición del respaldo, de modo que quede orientado hacia la misma dirección que las manetas del andador.
- Despliegue los reposapiés hacia adelante hasta que queden en posición funcional.
- Para volver al modo andador, devuelva el respaldo a la posición preferida para caminar cómodamente. Abata los reposapiés hacia fuera o, si lo prefiere, puede extraerlos.

## PLEGADO DEL ANDADOR



- Este andador cuenta con un sistema de plegado semiautomático que se activa con un simple movimiento.
  - Antes de comenzar, asegúrese de que los reposabrazos estén abatidos hacia afuera para evitar que obstruyan el proceso.
  - Tire hacia arriba del tirador ubicado en el asiento para iniciar el plegado. Al tirar del tirador, los dos lados del andador se irán acercando hasta quedar juntos, y el asiento se doblará por la mitad hacia arriba. Si lo prefiere, también puede plegarlo con el asiento doblado hacia abajo, como se muestra en la imagen.
- Para desplegar el andador, coloque una mano en cada tubo del asiento a ambos lados.
  - Empuje hacia abajo y los dos lados del andador se separarán progresivamente.



**RECUERDE:** Puede retirar la bolsa para facilitar el plegado.

**¡ATENCIÓN!** Asegúrese de que el asiento esté completamente desplegado antes de sentarse o de usar el andador.

## AJUSTE DE ALTURA DE LAS MANETAS



1. Afloje y extraiga la estrella.
2. Libere la maneta extrayendo el tornillo que la mantiene fijada en su lugar.
3. Mientras sostiene el tubo de la maneta, deslícelo hacia arriba o hacia abajo, asegurándose de hacer coincidir el agujero de la maneta con el agujero deseado del chasis.
4. Inserte el tornillo a través de ambos agujeros y fije la posición enroscando de nuevo la estrella.




**¡ATENCIÓN!** Ajuste la altura teniendo en cuenta su estatura, necesidades y preferencias, buscando alcanzar una postura cómoda y segura. Una configuración de altura incorrecta puede resultar en lesiones o fatiga.



**¡ATENCIÓN!** La altura de las empuñaduras y de las patas siempre debe ser la misma en ambos lados para distribuir equitativamente del peso y mantener la estabilidad del andador.

## FRENADO

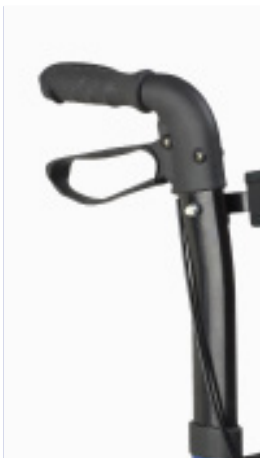

- Los frenos están integrados en los puños del andador. La maneta derecha controla el freno de la rueda derecha y la maneta izquierda controla el freno de la rueda izquierda.
- Para activar el freno, accione la palanca de freno, ubicada debajo de las empuñaduras, hacia arriba.
- **Autobloqueo:** Para bloquear las ruedas en su posición y mantener el andador inmóvil, el usuario debe bajar la palanca de freno hacia abajo hasta que se oiga un click. Este estado evita el desplazamiento no deseado del andador y le proporciona mayor estabilidad para sentarse.
- Para desbloquear las ruedas, simplemente levante las palancas de freno hacia arriba hasta su posición original.

## PORTABASTONES



- OGI PASEO incluye un portabastones de serie.
- Coloque la contera del bastón en el compartimento en el lateral derecho del andador, indicado en la imagen.
- Asegure la parte superior del bastón al andador con la correa.
- Cuando necesite usar el bastón, suelte el velcro de la correa y retire el bastón del portabastones

## ASIENTO

- Antes de sentarse, compruebe que el andador está completamente desplegado y no es susceptible a plegarse accidentalmente.
- Bloquee siempre los frenos antes de sentarse.
- Antes de sentarse en el andador, sitúese en una superficie plana y estable en la que no pueda perder el control. Evite sentarse en pendientes o superficies inclinadas.
- Inspeccione regularmente el asiento y su mecanismo de fijación para detectar desgastes o daños. Si nota algún problema, absténgase de usar el asiento.
- Tanto al sentarse como al levantarse, hágalo de manera gradual. No intente sentarse mientras el andador está en movimiento.
- Tenga siempre presente el centro de gravedad al sentarse y levantarse del asiento. Mantenga una postura recta al sentarse. Evite inclinarse excesivamente hacia adelante o hacia atrás mientras utiliza el andador.
- No utilice el asiento como taburete, trampolín o escalera ni realice actividades que impliquen ponerse de pie sobre él.
- El asiento del andador sólo está previsto para descansos cortos.
- El andador admite un peso máx. de 136 kg. No exceda la capacidad máx. de carga.



## INDICACIONES DE SEGURIDAD

- No permita que los niños jueguen con el embalaje.
- Este producto no es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños. Riesgo de asfixia y de daños por volcado.
- Antes de cada uso, realice una inspección visual del andador en busca de posibles daños o piezas sueltas. Verifique que los frenos y las ruedas estén en buen estado y que el chasis del andador no tenga deformaciones ni fisuras. Todos los tornillos deben estar apretados.
- No utilice el andador si detecta algún problema o si sospecha algún fallo en su funcionamiento.
- Este andador no está diseñado para su uso en escaleras. No intente ascender o descender escaleras con el andador.
- No utilice el andador en caso de lluvia intensa ni sobre suelos resbaladizos. Las superficies mojadas, fangosas o heladas pueden afectar a la tracción de las ruedas y aumentar el riesgo de caídas.
- Evite utilizar el andador sobre superficies irregulares. Extreme la precaución al pasar por áreas con cables, bordillos u objetos en el suelo. Evite alcantarillas, rejas u obstáculos parecidos. Evite áreas con tráfico vehicular o situaciones que puedan suponer un riesgo para su seguridad.
- No lo utilice en pendientes superiores al 15%, ya sea para ascensos, descensos o desplazamiento en diagonal.
- Mantenga una postura erguida y evite inclinarse excesivamente hacia adelante o hacia atrás mientras usa el andador. El andador debe manejarse pegado al cuerpo, adoptando una postura lo más recta posible.
- El andador admite un peso máximo de 136 kg. No exceda dicha capacidad de carga.
- Al transportar objetos en la bolsa de compra, asegúrese de distribuir el peso de manera equilibrada. Una carga desequilibrada puede afectar la estabilidad del andador.
- No utilice el andador para transportar personas.
- Compruebe la temperatura del andador antes de utilizarlo. En condiciones climáticas extremas, en exposición directa a la luz solar, durante visitas a saunas, etc. la superficie del andador puede alcanzar temperaturas peligrosas.
- Use su andador OGI siempre y cuando no esté bajo los efectos del alcohol, drogas o medicamentos que afecten a su capacidad mental y física.
- Asegúrese de que el andador sea utilizado únicamente por personas familiarizadas con estas instrucciones.

## LIMPIEZA Y CUIDADOS

No use productos de limpieza corrosivos o abrasivos, ni estropajos que puedan dañar la superficie del andador. Si es necesario, limpie el chasis con un paño suave húmedo. En caso de suciedad persistente, se puede aplicar una solución jabonosa suave o un producto de limpieza específico para superficies delicadas. Asegúrese de secar completamente el andador después de la limpieza, prestando especial atención a las partes metálicas y a las empuñaduras.

## ALMACENAJE

Almacene el andador en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa cuando no lo utilice. Evite la exposición prolongada a la humedad, ya que puede favorecer la corrosión de partes metálicas y el deterioro de otros componentes. Asimismo, evite almacenar el andador cerca de fuentes de calor intenso, como radiadores o estufas. Si lo considera necesario, puede cubrir el andador con una funda protectora contra la humedad y el polvo.

## REPARACIÓN

Para cualquier problema de funcionamiento, defecto o necesidad de reparación, comuníquese con nuestro Servicio Técnico Autorizado. Solicite y utilice repuestos exclusivamente proporcionados por el fabricante.



**No repare ni modifique el andador sin la autorización de nuestro departamento técnico. Hacerlo anulará automáticamente la garantía del producto y podría causar daños al mismo.**

## TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Asegúrese de conocer y cumplir con las normativas locales de eliminación de equipos médicos y otros dispositivos de asistencia. Algunas áreas cuentan con programas específicos para gestionar estos residuos. Contacte con el punto de reciclaje de su municipio y deseche el producto según las normas aplicables.

## DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Este producto cumple con la Regulación de la Comunidad Europea 2017/745 para la regulación de dispositivos médicos (MDR).

## DESCARGO DE RESPONSABILIDAD

Ortho Global Ideas no asume ninguna responsabilidad por daños causados por el uso inadecuado, abuso, negligencia, modificaciones no autorizadas o cualquier otro acto que no esté en conformidad con las instrucciones proporcionadas en este manual. Aunque nos esforzamos por proporcionar información precisa, este manual puede contener errores tipográficos u otros. No nos hacemos responsables de tales errores y nos reservamos el derecho de hacer cambios y correcciones sin previo aviso.

## GARANTÍA

Ortho Global Ideas se acoge a la reglamentación del Real Decreto 7/2021 sobre garantías, que cubre todos los defectos de materiales y/o fabricación en caso de falta de conformidad de su producto.

### CONTENIDO DE GARANTÍA SEGÚN RD 7/2021

En cualquier caso, la garantía de consumo será tramitada por parte del vendedor (empresario) al usuario final. Esta garantía no cubre las reclamaciones de reparación o sustitución del producto o de la pieza del producto por las siguientes razones:

1. Uso y desgaste normal de elementos como tapizados, arneses, baterías, almohadillados de reposabrazos, tapicerías, ruedas, zapatas de frenos, conteras de andador y bastones, etc.
2. Cualquier sobrecarga del producto; compruebe la etiqueta CE para confirmar el peso máximo autorizado del usuario.
3. Falta de mantenimiento del producto o del componente por no haber llevado a cabo las revisiones periódicas según las recomendaciones del fabricante, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
4. Se han realizado cambios o modificaciones en el producto o en sus piezas, diferentes de las especificadas por el fabricante.
5. Reparaciones realizadas sin haber informado previamente de las circunstancias al Servicio de Calidad de Ortho Global Ideas S.L.
6. Utilización de piezas o componentes que no sean los originales del fabricante.
7. El producto o sus componentes han sufrido daños por negligencia, accidente o uso inapropiado.
8. Desgaste de ruedas y conteras debido al uso normal. Arañazos, oxidación, deformación, decoloración y otros daños ocasionados por:
  - Exposición al agua o productos corrosivos.
  - Almacenamiento o transporte inadecuados.
  - Colisiones, golpes o caídas.
  - Uso incorrecto o no observación de las indicaciones de este manual.
  - Eventos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, terremotos, accidentes de tráfico o explosiones.
  - Otras causas ajenas a la fabricación del producto.

Si el producto incorpora baterías o arneses, la garantía de estas piezas coincidirá con su vida útil. La presente garantía solo cubre los defectos de fabricación y/o los defectos de material.

### PROCESO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Para realizar cualquier reclamación de garantía, debe dirigirse a la empresa responsable de la venta del producto indicando el problema existente, el modelo y el número de lote presentes en la etiqueta del producto, junto con la factura de compra. Para poder realizar una valoración, es necesario adjuntar fotografías y vídeos de la incidencia. Es muy recomendable adjuntar la siguiente página debidamente cumplimentada con el sello de la ortopedia, farmacia o centro donde adquirió el producto, así como la fecha de recepción y conformidad del mismo. En caso de imposibilidad de contactar con dicha empresa (por ejemplo, en caso de cierre), de acuerdo con el artículo 125, del capítulo III del RD 7/2021, puede dirigirse a Ortho Global Ideas a través de [info@orthoglobalideas.com](mailto:info@orthoglobalideas.com). Es imprescindible presentar la documentación anteriormente indicada. Tras la verificación del número de serie y/o lote de la factura y del manual, procederemos a contactar con usted para gestionar su reclamación en el menor tiempo posible.

## GARANTÍA

Ortho Global Ideas se acoge a la reglamentación del Real Decreto 7/2021 sobre garantías, que cubre todos los defectos de materiales y/o fabricación en caso de falta de conformidad de su producto.

### CONTENIDO DE GARANTÍA SEGÚN RD 7/2021

En cualquier caso, la garantía de consumo será tramitada por parte del vendedor (empresario) al usuario final. Esta garantía no cubre las reclamaciones de reparación o sustitución del producto o de la pieza del producto por las siguientes razones:

1. Uso y desgaste normal de elementos como tapizados, arneses, baterías, almohadillados de reposabrazos, tapicerías, ruedas, zapatas de frenos, conteras de andador y bastones, etc.
2. Cualquier sobrecarga del producto; compruebe la etiqueta CE para confirmar el peso máximo autorizado del usuario.
3. Falta de mantenimiento del producto o del componente por no haber llevado a cabo las revisiones periódicas según las recomendaciones del fabricante, tal y como se especifica en el manual de instrucciones.
4. Se han realizado cambios o modificaciones en el producto o en sus piezas, diferentes de las especificadas por el fabricante.
5. Reparaciones realizadas sin haber informado previamente de las circunstancias al Servicio de Calidad de Ortho Global Ideas S.L.
6. Utilización de piezas o componentes que no sean los originales del fabricante.
7. El producto o sus componentes han sufrido daños por negligencia, accidente o uso inapropiado.
8. Desgaste de ruedas y conteras debido al uso normal. Arañazos, oxidación, deformación, decoloración y otros daños ocasionados por:
  - Exposición al agua o productos corrosivos.
  - Almacenamiento o transporte inadecuados.
  - Colisiones, golpes o caídas.
  - Uso incorrecto o no observación de las indicaciones de este manual.
  - Eventos de fuerza mayor, como incendios, inundaciones, terremotos, accidentes de tráfico o explosiones.
  - Otras causas ajenas a la fabricación del producto.

Si el producto incorpora baterías o arneses, la garantía de estas piezas coincidirá con su vida útil. La presente garantía solo cubre los defectos de fabricación y/o los defectos de material.

### PROCESO DE RECLAMACIÓN DE GARANTÍA

Para realizar cualquier reclamación de garantía, debe dirigirse a la empresa responsable de la venta del producto indicando el problema existente, el modelo y el número de lote presentes en la etiqueta del producto, junto con la factura de compra. Para poder realizar una valoración, es necesario adjuntar fotografías y vídeos de la incidencia. Es muy recomendable adjuntar la siguiente página debidamente cumplimentada con el sello de la ortopedia, farmacia o centro donde adquirió el producto, así como la fecha de recepción y conformidad del mismo. En caso de imposibilidad de contactar con dicha empresa (por ejemplo, en caso de cierre), de acuerdo con el artículo 125, del capítulo III del RD 7/2021, puede dirigirse a Ortho Global Ideas a través de [info@orthoglobalideas.com](mailto:info@orthoglobalideas.com). Es imprescindible presentar la documentación anteriormente indicada. Tras la verificación del número de serie y/o lote de la factura y del manual, procederemos a contactar con usted para gestionar su reclamación en el menor tiempo posible.

Yo, \_\_\_\_\_

con DNI \_\_\_\_\_,

he revisado el producto y confirmo que este es conforme. Se ha recibido en buenas condiciones y de acuerdo a las especificaciones acordadas en fecha \_\_\_\_\_.

Fdo.:

MODELO:
Nº DE SERIE / LOTE:
FECHA DE COMPRA:
Nº DE FACTURA:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y CORREO ELECTRÓNICO DE LA EMPRESA:



**ORTHO GLOBAL IDEAS SL**  
C/ MAS DE LA MORRA 13, 08500,  
ESPAÑA TEL: +34 938 86 26 89  
Nº IMPORT ES-1M0009001  
LICENCIA SANITARIA: 6589-PS

info@orthoglobalideas.com  
www.orthoglobalideas.com

Consulta la última versión del  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**



Yo, \_\_\_\_\_

con DNI \_\_\_\_\_,

he revisado el producto y confirmo que este es conforme. Se ha recibido en buenas condiciones y de acuerdo a las especificaciones acordadas en fecha \_\_\_\_\_.

Fdo.:

MODELO:
Nº DE SERIE / LOTE:
FECHA DE COMPRA:
Nº DE FACTURA:
DATOS DE CONTACTO DEL USUARIO:



**ORTHO GLOBAL IDEAS SL**  
C/ MAS DE LA MORRA 13, 08500,  
ESPAÑA TEL: +34 938 86 26 89  
Nº IMPORT ES-1M0009001  
LICENCIA SANITARIA: 6589-PS

info@orthoglobalideas.com  
www.orthoglobalideas.com

Consulta la última versión del  
**MANUAL DE INSTRUCCIONES**

